

Dispositivo Médico



E Q U I L I B R I U M



MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO IIR

Rua Alexandre Brito Gouveia, s/n
Gavinhos de Baixo, 3400-004
Oliveira do Hospital, Portugal

Tel.: + 351 238 609 097

Tel.: +351 969 990 099

geral@wellgiven.com

www.wellgiven.com


MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO IIR



Artigo	Nome
DISPOSABLEMASK	Máscara Cirúrgica Tipo IIR
Descrição do Produto	
Composição: 1ªcamada: Spunbond 25gr – 100% Polipropileno 2ªcamada: Meltblown 25gr – 100% Polipropileno 3ªcamada: Spunbond 25gr – 100% Polipropileno	
Não esterilizado	
Contém três pregas e fixação nas orelhas através de elástico, com suporte para o nariz integrado na parte superior (clipe nasal adaptável).	
Cores Disponíveis	
Azul	

A máscara cirúrgica está em conformidade com a norma EN14683:2019 (Tipo IIR) e cumpre com os seus requisitos de acordo com o relatório do EQUILIBRIUM em vigor Nº 20210108. Os testes foram realizados entre as seguintes datas: 2021/01/06 e 2021/01/13

MEDIDAS / EMBALAGEM

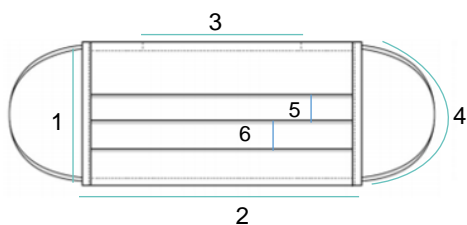

MEDIDAS		CM
1	Altura	9,5
2	Comprimento	18
3	Clip nasal	10
4	Elástico	18
5/6	Altura das pregas	1
	Altura da mascara aberta	15

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Não aplicável. Descartável.

EMBALAGEM

5 Peças por embalagem.
10 Embalagens por caixa.
Tamanho da caixa 60x40x30

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As máscaras descartáveis devem estar em conformidade com a norma EN14683: 2019 (Tipo IIR), cumprindo com os requisitos da capacidade de filtração bacteriana e da respirabilidade.

EQUILIBRIUM	
	98.7% ± 1.8%
EFICIÊNCIA DA FILTRAÇÃO BACTERIANA (EFB) EN14683:2019+AC2019- 5.2.2	Condições teste: <ul style="list-style-type: none">- Temperatura e Humidade relativa: 21±5°C / 85 ± 5 %- Area de cada réplica : 49cm²- Taxa de fluxo de ar: 28.3 l/min- MPS: 3.1
	36.7 ± 8.7%
Pressão Diferencial (Respirabilidade) EN14683:2019+AC2019- 5.2.3	Condições teste: <ul style="list-style-type: none">- Temperatura e Humidade relativa: 21±5°C / 85 ± 5 %- Area de cada réplica: 49cm²- Taxa de fluxo de ar: 8L/min
Limpeza Microbiana (Bioburden) EN ISO 11737-1:2018	7 ± 20%

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A máscara descartável deve ser manuseada corretamente. Aqui estão as instruções recomendadas para o uso correto da máscara:

- Higienizar as mãos, com água e sabão ou solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- Colocar a máscara com a frente voltada para o rosto e a parte traseira voltada para fora;
- Ajustar o clipe nasal, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando-se de que não há espaços entre o rosto e a máscara;
- A máscara não deve ser tocada enquanto estiver em uso. Se isso acontecer, a higienização das mãos deve ser realizada imediatamente;
- A máscara deve ser substituída por uma nova ao fim de 4h ou quando estiver húmida;
- As máscaras de uso único não devem ser reutilizadas;
- A máscara deve ser retirada segurando os laços ou elásticos;
- A máscara deve ser descartada e colocada em recipiente adequado para resíduos;
- Higienizar as mãos ao final do uso e manuseamento da máscara.

WELLGIVEN

PORTUGAL

